



ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass für jeden Patienten aufgrund seiner individuellen Grunderkrankung(en), Konstitution, Ressourcen und auch Reaktionen ein individueller Behandlungsplan erstellt werden muss und die Firma NOVAFON dazu keine Auskunft geben kann. Außerdem dürfen die Aufsätze nur am selben Patienten mehrmals verwendet werden. Die oben genannten Beispiele sind als solche zu verstehen und nicht auf jeden Patienten übertragbar. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von anderen Einsatzmöglichkeiten, die hier nicht alle im Detail aufgeführt werden können.

PREISE

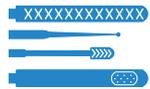

Intraoral-Set
(alle 4 Aufsätze)
CHF 88.00

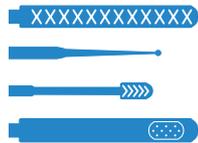

Spatelaufsatz CHF 24.00
Kugelstab CHF 24.00
Pfeilaufsatz CHF 24.00
Löffelaufsatz CHF 24.00

NEUE AUFSÄTZE FÜR DAS NOVAFON ZUR INTRAORALEN STIMULATION



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder wie sie angewendet werden?

Informieren Sie sich auf unserer Website www.novafon.ch


oder rufen Sie uns an +041 558 86 41

oder schreiben eine Mail an info@birkenrot.ch



SPATELAUFSATZ

- Zungenkräftigungsübungen
- Flächiges Tapping auf der Zunge
- Zungenrand- und Wangenstimulation
- Förderung des Mundschlusses

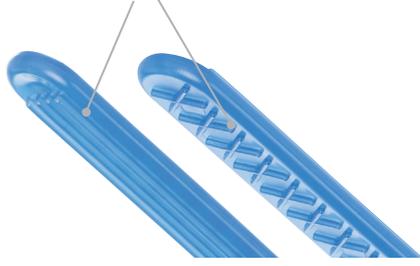

RUTSCHFEST DURCH X-MUSTER UND LÄNGSRIFELUNG

ANWENDUNGSBEISPIEL SPATELAUFSATZ

1. Tonisierung der Wangen und Zunge

Ziel: Tonusstärkung und entgegenwirken einer Atrophie

Passiver Übungsteil: Flächiges Tapping von hinten nach vorne mit größtmöglicher Auflagefläche des Spatelets auf der Zunge. Stimulation der Wangeninnenseite durch Platzieren des Spatelets in der Wange und sanftem Gegendruck von außen.

2. Zungenkräftigungsübungen

Ziel: Zungenkräftigung bei Hypotonie

Aktiver Übungsteil: Stimulieren Sie den Zungenrücken, die Zungenränder, die Zungenspitze und die Zungenunterseite zunächst flächig und geben dann einen vorsichtigen Druckimpuls und fordern den Patienten auf einen Gegen- druck zu erzeugen.


3. Tonisierung der Lippen

Ziel: Förderung des Mundschlusses

Passiver Übungsteil: Erzeugen Sie mit Hilfe des Kieferkontroll- griffes einen Mundschluss und legen Sie den Spatelaufsatz vorsichtig mit einer der beiden strukturierten Seiten auf die geschlossenen Lippen. Aktiver Übungsteil: Bitten Sie den Patienten den Spatelaufsatz mit den Lippen festzuhalten

PFEILAUFSATZ

- Wahrnehmungsförderung intra- und extraoral
- Tonisierung der Zunge, Wangen und Lippen
- Zungenfurchenbildung

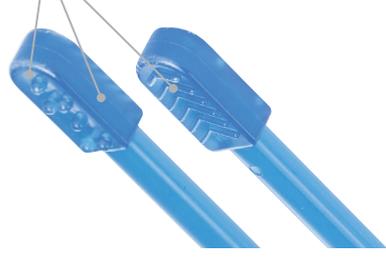

PFEILMUSTER, NOPPEN UND GLATTE OBERFLÄCHE ZUR VIELSEITIGEN STIMULATION

ANWENDUNGSBEISPIEL PFEILAUFSATZ

1. Zungenfurchenbildung

Ziel: Boluskontrolle steigern

Passiver Übungsteil: Pfeilaufsatz mit einer der beiden strukturierten Oberflächen auf der Zungenmitte platzieren und dort halten oder Ausstreichen der Zungenmittelfurche von hinten nach vorne.

2. Stimulation bei Fazialisparese

Ziel: Tonusregulation bei Fazialisparese oder Mundastischwäche

Passiver Übungsteil: Fahren Sie mit dem Pfeilaufsatz entlang des Verlaufs des orbicularis oris. Aktiver Übungsteil: Bitten Sie den Patienten unmittelbar nach der Stimulation eine aktive Ansteuerung des Muskels (Mund- breit ziehen und rund formen) durchzuführen.

KUGELSTAB

- Schluckreflextriggereung

- Hinweisgeber Artikulationsort

- Aktivierung des Speichelflusses

- Erarbeitung einer Zungenmittelfurche

PRÄZISE UND PUNKTGENAUE ANWENDUNG DANK KLEINER KUGELSPITZE




LÖFFELAUFSATZ

- Schlucktraining mit Nahrung

- Training der Zungenspitzenmotilität

- Stimulation der Hinterzungge

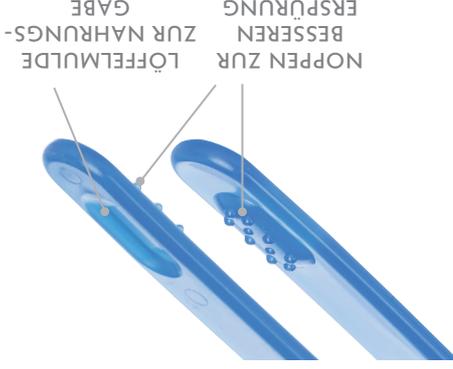

NOPPEN ZUR BESSEREN ERSPÜRUNG ZUR NAHRUNGS- GABE LÖFFELMULDE

ANWENDUNGSBEISPIEL KUGELSTAB

1. Stimulation der vorderen Gaumenbögen

Ziel: Schluckreflextriggereung, Velumelavation

Passiver Übungsteil: Streichen Sie mit der Kugelspitze, die Sie vorher in Eiswasser gekühlt haben, vorsichtig seitlich an den vorderen Gaumenbögen entlang.

Aktiver Übungsteil: Bitten Sie den Patienten im Anschluss willentlich zu schlucken. Bitten Sie den Patienten ein „a“ zu phonieren um eine Velumelavation zu erzeugen.

2. Präziser Hinweis Artikulationsort bei Sprechapraxie und Dysarthrie

Ziel: Gezielte Artikulationsbewegung

Passiver Übungsteil: Stimulation der 3. Artikulationszone am Gaumen, z.B. für Produktion des Lautes /k/ oder /g/ Aktiver Übungsteil: Bitten Sie den Patienten, Silben oder Wörter mit /k/ Anlaut zu artikulieren, nachdem Sie einen kurzen, plosiven, sensorischen Input mit dem Kugelstab an der Hinterzungge gegeben haben.

ANWENDUNGSBEISPIEL LÖFFELAUFSATZ

1. Zungenspitzentraining

Ziel: Steigerung der Zungenspitzenmotilität

Aktiver Übungsteil: Befüllen Sie die Mulde mit einer kleinen Menge klebriger Konsistenz (Honig oder Nutella; Achtung nicht geeignet für Patienten mit Aspirationstgefahr!) und platzieren Sie den Löffelaufsatz mit den Noppen nach proximal zeigen oder in den Wangentaschen. Lassen Sie den Inhalt nun vom Patienten mit der Zungenspitze suchen und auslecken.

2. Zungenrückensstimulation

Ziel: Schluckreflextriggereung und Zungenrückenelevation

Passiver Übungsteil: Legen Sie den Löffelaufsatz mit der Noppenunterseite auf den Zungenrücken und lassen den Patienten die Vibration spüren. Geben Sie einen leichten Druckimpuls. Aktiver Übungsteil: Fordern Sie den Patienten zum Schlucken auf oder kombinieren Sie diese Übung mit dem Artikulationsstraining der 3. Artikulationszone.