

1 Entsperren



- Über die An/Aus Taste das Gerät anschalten
- Bei geschlossenem Symbol befindet sich das NOVAFON im Travel Lock (Transportsicherung)
- Zum Entsperren und Sperren die An/Aus Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, das Gerät startet bei 100 Hz
- Mit den Tasten „Frequenzeinstellungen“ können Sie die Frequenz wechseln und das Gerät ausschalten oder in den Standby-Modus setzen

2 Koppeln

- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version der NOVAFON App installiert haben, um Ihr neues Gerät mit der App koppeln zu können
- Öffnen Sie die App, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und schalten Sie für Android die Standortfreigabe frei
- Halten Sie beide Tasten auf Ihrem NOVAFON power 2 für ca. 5 Sekunden gedrückt – auf Ihrem NOVAFON Display erscheint nun „searching...“
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr NOVAFON power 2 zu koppeln



3 Personalisieren

Werden Sie kreativ und lassen Sie sich von Ihrem NOVAFON power 2 individuell begrüßen, wählen Sie Ihre Lieblings-Displayfarbe und legen Ihre favorisierte Behandlungsdauer fest.



4 Behandeln

- Ihre persönlichen Einstellungen können Sie ganz einfach über die NOVAFON App im Tab „My NF“ vornehmen
- Jede Intensität, so wie Sie sie gerade brauchen
- Individualisieren Sie die 3 Intensitätsstufen so, dass sie für Sie angenehm sind



LET'S GET STARTED
Schritt für Schritt Anleitung für das beste NOVAFON Erlebnis



SAY HI!
TO THE FUTURE
OF RECOVERY

Willkommen in der NOVAFON Family!
Starten Sie mit uns in eine neue NOVAFON
Ära und erleben Sie das NOVAFON so smart
wie nie zuvor.

Erleben Sie das volle Intensitäts-
spektrum in einem Gerät und drei
Frequenzstufen, die Ihre
NOVAFON Anwendung noch
vielseitiger machen. Verbinden
Sie das Gerät ganz einfach mit
unserer kostenlosen NOVAFON
App, um Ihre Behandlungsfort-
schritte immer im Blick zu
behalten.

Bevor es losgeht, hier noch
ein paar Infos und Tipps, wie Sie
Ihr NOVAFON in Betrieb nehmen,
auf sich personalisieren und
zusammen mit der NOVAFON App
seine volle Wirkung nutzen
können.

Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da!

Wenden Sie sich dafür gerne an unseren
Kundenservice unter

novafon.de/kontakt-zu-novafon



Jetzt einmalige
Chance auf 100 €

Sie sind begeistert von Ihrem
NOVAFON?

Dann lassen Sie es die Welt
wissen! Wir freuen uns auf
Videos, Stories, Fotos von Ihnen
oder Ihrem Tier mit dem
NOVAFON power 2.

 [@novafon_de](https://www.instagram.com/novafon_de)
[@novafon_vet](https://www.instagram.com/novafon_vet)

Jedes von uns geteilte Video
erhält einen 100 € NOVAFON
Gutschein für den Online Shop.*

* Für jede Veröffentlichung über unsere offiziellen Instagram Kanäle vergeben wir einen 100 € NOVAFON Onlineshop Gutschein. Vor der Veröffentlichung erhalten Sie ein Formular zur Unterschrift. Der Gutschein wird Ihnen nach der Veröffentlichung per Email zugesandt.

DAS NOVAFON
power 2




MAGNET-PIN LADEBUCHSE

Downloaden Sie die kostenfreie
NOVAFON App, um folgende
zusätzliche Features zu aktivieren:

Individuell abstimmbare
Intensitätsbereiche —
Guided Treatment:

- Anwendungsvideos mit
Einstellungsempfehlungen für
DAS NOVAFON power 2
- Speicherbare persönliche
Behandlungsprogramme
für mehrere Anwender
- Tracking des
Behandlungsverlaufs

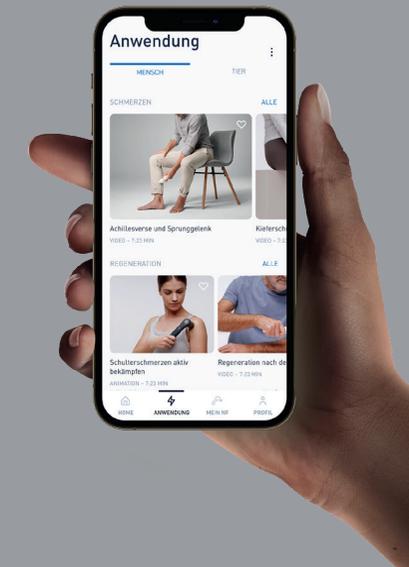

→ hier geht's zur App

0220094_V01.1

NOVAFON



SAY HI!
TO THE FUTURE OF RECOVERY